

Rengøring og desinfektion af fleksible endoskoper med overtræk

1.1 Fremgangsmåde før endoskopi

Endoskoper, der inden for 3 døgn er behandlet efter de under pkt. 1.2 angivne procedurer, kan umiddelbart anvendes. På andre endoskoper skal de angivne procedurer under punkt 1.2 udføres. Er overfladedesinfektionen lige udført, skal endoskopets overflade være visuelt helt tør.

1.1.1 Overtrækkes påføres

Overtrækket påføres endoskopet efter producentens anvisninger. Ved den videre håndtering skal det sikres, at overtrækket ikke beskadiges eller kontamineres af omgivelserne.

1.2 Fremgangsmåde efter endoskopi

1.2.1 Overtrækket fjernes

Overtrækket fjernes straks fra endoskopet efter producentens anvisninger. Overtrækket bortskaffes på en sådan måde, at det ikke forurener omgivelserne.

1.2.2 Inspektion

Endoskopets overflade inspiceres for eventuel fugt. Ved mindste tegn på fugt skal endoskopet på mistanke om en lækage i overtrækket rengøres og desinficeres som et tilsvarende endoskop uden overtræk.

1.2.3 Manuel rengøringsprocedure (Kat. IA)

Den manuelle rengøring udføres i et dertil egnet rum (se afsnit C) som forberedelse og forudsætning for den efterfølgende manuelle desinfektion. (Kat. IB)

- a. Hele endoskopets overflade vaskes i frisktappet vand tilsat et egnet detergent.
- b. Endoskopets overflade aftørres herefter med en ren klud.

1.2.4 Manuel desinfektion

- a. Endoskopet desinficeres ved aftørring med alkohol (70-85 v/v%) (se andre anbefalede desinfektionsmidler på).
- b. Når endoskopet er visuelt tørt kan det anvendes eller lagres.

1.3 Opbevaring

- a. Endoskopet opbevares i et ventileret skab. (Kat. II)

1.4 Detergenter til manuel rengøring

- a. 3E-Zyme[®], Bodedex Forte[®], Cidexzyme[®], Sekusept-Multienzyme[®], Ultrasan[®].